



Entretien de votre table Sukha :

Pour prolonger la durée de vie de votre table Sukha, un entretien adéquat est essentiel.

Voici quelques conseils importants à suivre :

- Évitez de conserver votre table dans des conditions de température extrêmement basses, car une exposition excessive au froid pourrait endommager le rembourrage.
- Évitez de conserver votre table dans des températures extrêmement chaudes, car une exposition excessive à la chaleur entraînerait l'étirement et le plissement du rembourrage. Veuillez conserver votre table à l'écart des foyers de chauffage, des appareils électriques et de la lumière directe du soleil.
- Protégez votre table et vos accessoires des abrasions, des coupures et des perforations à l'aide de draps, de couvertures molletonnées et/ou d'une housse de protection de table en vinyle.
- Nettoyez quotidiennement le rembourrage pour le protéger contre les taches d'huile et la saleté qui peuvent à la longue le détériorer et le fendre. Un mélange doux de savon de vaisselle antibactérien et de l'eau est recommandé. Cette solution peut être pulvérisée sur la table et essuyée avec un chiffon propre et humide. Les désinfectants à base d'alcool et ceux recommandés pour le nettoyage des surfaces dures risquent de dessécher et de fissurer le rembourrage avec le temps.
- Utilisez la table Sukha à chacune de ses extrémités pour favoriser une usure uniforme du coussin de rembourrage. Un système d'œilletons aux deux bouts de la table permet de fixer la plate-forme et le coussin de l'appui-tête réglable.

Visitez orthocanada.com. Nos solutions. Vos résultats.